

STOFFEN MONDMASKERS

OPZETTEN

WAS JE
HANDEN
MET
ZEEP



1 Raak enkel de linten aan

Zet bovenkant
over jouw neus
en knoop vast

2

Bedek je kin
en knoop
onderaan vast

3



DRAGEN

Probeer het masker
niet meer aan te
raken.



Indien toch
noodzakelijk, raak
enkel de zijkanten aan.

AFZETTEN



Raak enkel de
zijkanten aan.

Was het masker of
leg het op een
veilige plaats.

WAS JE
HANDEN
MET
ZEEP



WASSEN



POT MET WATER

(daarna niet meer in koken)



met zeep (tegen vlekken)



60° (belletjes op bodem pot)
tot 100° (borrelend water)



5 minuten

OF

HANDWAS
MET ZEEP



HEET
STRIJKEN



WASMACHINE



60° (kan met de
rest van de was)



GEVAARLIJK EN



NIET ZEKER OF
VIRUS WEG IS:

(MICROGOLF)-
OVEN



IN OMSLAG OF
NIKS DOEN



DROGEN



WASLIJN



OF

DROOGKAST

